



Incidin[®] Extra N

SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA

- Sadrži Glucoprotamin[®]
(patentirani sastojak)
- Izvanredna svojstva čišćenja
- Ekonomičan



Površinsko sredstvo za dezinfekciju medicinskih uređaja

Tečni koncentrat za dezinfekciju svih vrsta površina

Na odeljenjima za ginekologiju i akušerstvo, u pedijatriji, onkologiji, u delatnostima nege za starije osobe, i pacijenti i osoblje moraju biti zaštićeni od unakrsnih infekcija. Čišćenje i dezinfekcija površina bezmirisnom, neisparivom bazom aktivnih sastojaka značajno doprinosi toj zaštiti.

Područje i način primene

Sredstvo za dezinfekciju površina i medicinskog inventara u skladu s evropskom Direktivom o medicinskim uređajima (93/42/EEC).

Pogodan je i za ostale perive površine.



Precizno doziranje:
Naš dozirni uređaj DG 1

Preporuka za primenu

Razredite tečnost vodom (maks. temp. 40°C) (preporučuje se primena dozatora). Nije potrebno naknadno brisanje.

Za ručno čišćenje.

Sredstvima za dezinfekciju rukujte oprezno. Pažljivo pročitajte deklaraciju i informacije o proizvodu pre korišćenja.

Samo za profesionalnu upotrebu.

Rezultati ispitivanja

Delotvornost i kompatibilnost materijala temeljno ispitana - mikrobiološki, virološki, toksikološki i ekološki. **Molimo zatražite našu brošuru s rezultatima ispitivanja i našu procenu kompatibilnosti materijala.**

CE0297

Nudimo kompletne usluge i uputstva koji u potpunosti zadovoljavaju sve vaše potrebe na području higijene i dezinfekcije institucionalnih, industrijskih i bolničkih objekata. Zatražite detaljnije informacije o našim proizvodima i uslugama u Evropi i svetu.

Ecolab–Vaš partner za sveobuhvatna higijenska rešenja!

Ecolab Healthcare
Čisto. Sigurno. Zdravo.

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com
© 2008 Ecolab Inc. All rights reserved.

Naša ponuda

Deluje na široki spektar bakterija, višestruko otporne bakterije staphylococcus aureus (MRSA), tuberkulozu, gljive, virus hepatitisa B (HBV) u MADT i antigen testiranjima, AIDS agens (HIV), virus kravljih boginja, adeno, papova, rota i herpes viruse

Sadrži Glucoprotamin®

Izvrсна svojstva čišćenja

Niska koncentracija kod upotrebe

Overeno od Nemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju (DGHM)

Prikladno za dozirne uređaje DG 1, DG 2, DG 3, DZ 1, DZ 2

Kompatibilnost materijala temeljno ispitana

Veličine pakovanja

Incidin® extra N 40227620
plastični kanister 1 x 6l

Sastav

Antimikrobni aktivni sastojci, nejonski tenzidi, rastvor, kompleksatori, veštačka boja i mirisi.

Aktivni sastojci na 100 g proizvoda: 12,4g Glucoprotamin®-a i 15g benzalkonijum hlorida

Vaša korist

Pouzdan u visokom stepenu dezinfekcije svih perivih površina, čak i u područjima visokog rizika, npr. na odeljenjima pedijatrije zbog delotvornosti na adenoviruse ili u operacionim salama zbog delotvornosti na HBV i virus kravljih boginja.

Ne sadrži aldehide, dobra kompatibilnost materijala

Čišćenje i dezinfekcija u jednom koraku

Ekonomičan zbog manje ambalažnog otpada

Visoko sofisticiran i temeljno ispitano proizvod

Jednostavno nanošenje uz precizno doziranje

Može se koristiti na:

- metalima, npr. bronzi
- sintetičkim materijalima, npr. polimetilmetakrilatu (Plexiglas®)
- elastomerima, npr. EPDM
- podnim oblogama, npr. linoleumu

Mikrobiološki i virološki rezultati

	Koncentracija		Vreme delovanja
	%	ml	
Dezinfekcija površina u bolnicama i lekarskim ordinacijama (DGHM)	0.25	2.5	4:00 h
	0.5	5	1:00 h
	1.0	10	0:30 h
	2.0	20	0:15 h
Dezinfekcija površina u Nemačko društvo za higijenu i mikrobiologiju			
Delotvoran protiv višestruko otpornih stafilokoka (MRSA)	0,5	5	0:15h
Delotvoran protiv TBC prema suspenzijskom testu s mikobakterijom M. terrae ¹⁾	0,25 1,0	2,5 10	1:00h 0:30h
Virucidno delovanje na viruse sa omotačem (uklj. HIV, HBV i HCV) ²⁾	0,5	5	0:15h
Delotvoran na Adenoviruse Papova viruse Rotaviruse	0.5	5	1:00 h
	0.5	5	0:15 h
	0.25	2.5	0:05 h

1) prema DGHM 2) prema preporuci RKI (Nem. instituta za zdravstvo Robert Koch) 01/2004

Ecolab Hygiene d.o.o.
Milana Tankosića 8, 11000 Beograd, Srbija
www.ecolabhealthcare.rs
tel: +381 11 2076 800 fax: +381 11 2076 802

ECOLAB®