



## Incidin<sup>®</sup> Foam

# GOTOVA PENA U SPREJU ZA BRZU DEZINFEKCIJU ALKOHOLOM

- nov oblik boce
- poboljšano rukovanje
- inovativna mlaznica raspršivača
- dobri rezultati čišćenja
- ne stvara aerosol
- blago, a efikasno sredstvo



Gotova sprej pena brzog delovanja za čišćenje i dezinfekciju medicinskih uređaja

### Opis proizvoda

...gotova pena u spreju za brzo delovanje čak i na osetljivim površinama u zdravstvenim ustanovama.



Incidin® Foam

### Područje i način primene

Gotova sprej pena brzog delovanja za dezinfekciju medicinske opreme u skladu sa Evropskom direktivom o medicinskim uređajima (93/42/EEC). Pogodna i za druge površine otporne na alkohol.

Za nanošenje pomoću raspršivača ili prebrisavanjem.

### Preporuka za primenu

Gotova sprej pena. Raspršiti na površinu sa udaljenosti od oko 30 cm (40ml/m<sup>2</sup>), ostaviti da kratko deluje i potom obrisati netkanim flisom, ili nerazređen proizvod naneti na flis, obrisati površinu i ostaviti da se osuši. Sredstvima za dezinfekciju rukujte sigurno. Pre korišćenja uvek pažljivo pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.

### Rezultati ispitivanja

Temeljito ispitano – mikrobiološki, viruloški, toksikološki i ekološki. Molimo zatražiti rezultate ispitivanja.

# CE0297

### Naša ponuda

Delovanje na široki spektar bakterija (uklj.TBC), gljiva, papova virus, adenovirus, vaccinia virus, rota virus i virus hepatitisa B (HBV), kao i na virus AIDS-a (HIV)

Raspršivač pene

Pena

Sadrži Glucoprotamin®

Uravnotežena sinergijska formulacija različitih aktivnih supstanci

Gotovo sredstvo spremno za upotrebu

Izuzetno kratko vreme delovanja

Temeljno ispitano na podnošljivost materijala

Prijatan miris limuna

### Veličine pakovanja

16 x boce od 750 ml u kutiji uz 2 raspršivača pene

Veličina pakovanja 16 x 750ml

Oznaka proizvoda 40228737

Raspršivač pene

Pakovanje kom

Oznaka pakovanja 41028947

### Sastav

Aktivni sastojci u 100g **Incidin® Foam**:  
20g 2-propanola, 10g etanola,  
0,2g benzalkonij hlorida,  
0,01g glukoprotamina

Nudimo kompletne usluge i uputstva koji u potpunosti zadovoljavaju sve vaše potrebe na području higijene i dezinfekcije institucionalnih, industrijskih i bolničkih objekata. Zatražite detaljnije informacije o našim proizvodima i uslugama u Evropi i svetu.

Ecolab – Vaš partner za sveobuhvatna higijenska rešenja!

Gotova sprej pena brzog delovanja za dezinfekciju i čišćenje drugih površina otpornih na alkohol.

### Vaša korist

Pouzdana dezinfekcija svih površina i predmeta

Nema udisanja aerosola

Vidljivo navlaživanje površina, njena dezinfekcija

Ne sadrži aldehide, izvanredno dobro podnošljivo

Efikasno vlaženje površine, alkoholi obezbeđuju brzo sušenje, dobra efikasnost čišćenja

Jednostavno za rukovanje, spremno za upotrebu

Brza dezinfekcija i sigurnost za pacijente i osoblje. Omogućuje brzu upotrebu površina i medicinskih uređaja nakon dezinfekcije

Za korišćenje na: metalima, plastici, lakiranim površinama (npr. zubarskim stolicama), polikarbonatu, polisulfonu, pleksiglasu, itd.

Prijatni radni uslovi za osoblje, izuzetna higijena za pacijente

### Mikrobiološki i virološki rezultati

	vreme delovanja
Dezinfekcija površina prema metodama DGHM	5 min
Brza dezinfekcija protiv bakterija prema DGHM	1 min
Delotvornost na HBV (uklj. HIV)	5 min
Delotvornost na - vaccinia (soj lister) - adeno (adenoid 6) - papova SV (777)	1 min 1 min 30s
Delotvornost na rotavirus	30s

**Ecolab Healthcare**  
Čisto. Sigurno. Zdravo.

**Ecolab Inc.**

370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com

Š 2008 Ecolab Inc. All rights reserved.

**Ecolab Hygiene d.o.o.**

Milana Tankosića 8, 11000 Beograd, Srbija  
www.ecolabhealthcare.rs

tel: +38111 2076 800 fax: +38111 2076 802

**ECOLAB®**