



Incidin® PLUS

INOVATIVNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA

- Sadrži Glucoprotamin® (patentirani sastojak)
- Bez QAC /bez aldehida
- Odlično čisti i dezinfikuje



Incidin® PLUS sa patentiranom aktivnom supstancom Glucoprotamin® za modernu dezinfekciju površina. Bez QAC i aldehida. Incidin® PLUS je sredstvo kompatibilno sa materijalima, veoma efikasno u čišćenju i bezbedno za upotrebu u oblastima visokog rizika.

Odluke

Širok spektar delovanja na bakterije (takođe MRSA i TB), gljive, papova-, adeno-, vaccinia-, herpes-, rota- i Hepatitis B- virus (HBV) u MADT i antigen testu, kao i na virus AIDS-a (HIV)

Može da se kombinuje sa Indur® billant plus i Gloss Xpress (visoko koncentrovani rastvor za čišćenje)

Sadrži Glucoprotamin® patentiranu aktivnu supstancu

Intenzivni efekat čišćenja

Niska koncentracija rastvora koji se nanosi

Antimikrobno sredstvo bazirano na prirodnim obnovljivim sirovinama

Poseđuje sertifikat nemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju (DGHM)

Pogodan za dozirne uređaje DG1, DG2, DG3, DZ1, DZ2.

Kompatibilnost materijala je detaljno ispitana

Vaša korist

Pouzdanost i visok stepen dezinfekcije svih perivih površina, čak i u rizičnim područjima, npr. u pedijatriji zbog efikasnosti protiv adeno- i rota- virusa, ili u operacionim salama zbog efikasnosti protiv HBV/ vaccinia virusa

Dezinfekcija, čišćenje i održavanje podova u jednom koraku. Što znači:

- uštede u vremenu i novcu
- zaštita podova

Bez QAC i aldehida, dobra kompatibilnost sa materijalima bez ostataka i efekta lepljenja

Dodatno čišćenje nije potrebno

Veoma je ekonomičan, sa manje otpada zbog ambalaže, pa time i manji utrošak sirovina

Lako se biološki raspada, čime se doprinosi zaštiti životne okoline

Najbolja moguća bezbednost za korisnika

Jednostavna primena, u preciznim dozama

Može se koristiti na:

- metalima, npr. mesing
- plastici, npr. polikarbonati
- elastomerima, npr. EPDM
- podovima, npr. linoleum

Primena i područje primene

Sredstvo za dezinfekciju površina medicinskih instrumenata u skladu sa Direktivom za medicinska sredstva (93/42/EEC). Takođe je pogodno za druge perive površine.

Preporučena primena

Pripremiti rastvor sa vodom (max 30° C, preporučuje se upotreba dozirne opreme). Prebrisati površinu rastvorom i ostaviti da se osuši. Na većini površina nije potrebno dalje brisanje. Za ručno čišćenje da bi se izbeglo eventualno oštećenje polikarbonata, polisulfona i akrila (npr. čašice za urin), posle svakog nanošenja potrebno je brisanje. Sredstvo koristiti pažljivo. Pre upotrebe pročitajte deklaraciju i informacije o proizvodu.

Mikrobiološki i virološki rezultati

	Koncentracija		Vreme delovanja
	%	ml	
Dezinfekcija površina u bolnicama i lekarskim ordinacijama (DGHM) nemačko društvo za higijenu i mikrobiologiju	0,25 0,5 1,0 2,0	2,5 5 10 20	4:00 h 1:00 h 0:30 h 0:15 h
Delotvoran protiv višestruko otpornih stafilocoka (MRSA)	0,5	5	1:00 h
Delotvoran protiv TB prema suzpenzijskom testu sa mycobacterium terrae ¹⁾	0,25 0,5 1,0	2,5 5 10	1:00h 0:30h 0:15
Virucidno delovanje na viruse sa omotačem (uklj. HIV, HBV i HCV) ²⁾	0,25 0,5	2,5 5	1:00h 0:15h
Delotvoran na Adeno viruse Papova viruse Rota viruse	1,0 0,5 0,5	10 5 5	1:00 h 1:00 h 0:15 h
EN 1276 baktericidno delovanje	0,25	2,5	0,15h
EN 1650 fungicidno delovanje	0,25	2,5	0:15h

1) prema DGHM

2) prema preporuci RKI (nem. instituta za zdravstvo Robert Koch)

01/2004



Precizno doziranje:
Naš dozirni uređaj DG 1

Veličine pakovanja

2 lit boca sa automatskim doziranjem	3 x 2 L
6 lit plastični kanister	1x 6 L
30 lit plastični kanister	1x30 L

Rezultati ispitivanja

Detaljno testiran – mikrobiološki, virološki, toksikološki i ekološki. Možete nam se obratiti za izveštaje o proceni.

Sastav

Aktivni sastojci sadržani u 100g Incidin® PLUS: 26 g Glucoprotamin®

Samo za profesionalnu upotrebu.

Nudimo kompletne usluge i proizvode koji u potpunosti zadovoljavaju sve vaše potrebe na području higijene i dezinfekcije institucionalnih, industrijskih i bolničkih objekata. Zatražite detaljnije informacije o našim proizvodima i uslugama u Evropi i svetu.

Ecolab – Vaš partner za sveobuhvatna higijenska rešenja!

Ecolab Healthcare
Čisto. Sigurno. Zdravo.

Ecolab Inc.

370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

© 2008 Ecolab Inc. All rights reserved.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8, 11000 Beograd, Srbija
www.ecolabhealthcare.rs

tel: +381 11 2076 800 fax: +381 11 2076 802

