



Sekusept® aktiv

DELOTVORNO ČIŠĆENJE I VEOMA EFIKASNA DEZINFEKCIJA SVIH VRSTA INSTRUMENATA

Sekusept® aktiv je veoma delotvorno, potpuno rešenje za čišćenje i dezinfekciju instrumenata i endoskopa.

Visoko delotvoran Sekusept® aktiv garantuje isplativost zbog niske koncentracije dovoljne za postizanje vrhunskog efekta.

Efikasna dezinfekcija instrumenata
Delotvoran na bakterije (uklj. TBC),
gljive, DVV viruse, viruse hepatitisa
B (HBV) i HIV.

Sigurnosni koncept bez aldehida obezbeđuje
podnošljivost materijala i dugoročno
održavanje vrednosti instrumenata.



Naša ponuda

Dezinfekcija

Ispitano u skladu sa smernicama nemačkog društva Standardna sigurnost za korisnika za higijenu i mikrobiologiju
U postupku za sertifikaciju

Delotvoran na HBV, HIV i DW viruse (adeno, papova, vaccinia i polio viruse)

Službeno potvrđena ispitivanja pružaju sigurnost u situacijama koje uključuju različite rizike zaraze virusima

Kratko vreme delovanja zahvaljujući i visokoj efikasnosti formulacije

Brzo cirkulisanje pribora

Dovoljna je niska koncentracija

Ekonomičan

Čišćenje

Maksimalni efekat čišćenja

Izuzetna efikasnost čišćenja i na jako uprljanim instrumentima
Ušteda vremena zbog smanjenog četkanja
Veći stepen čistoće
Besprekorna optika instrumenata

Kompatibilnost materijala

Pogodan za primenu na širokom spektru materijala

Univerzalno sredstvo pogodno za sve instrumente, posebno fleksibilne endoskope i ključne materijale poput silikona, polikarbonata, polisulfona i pleksiglasa
Pogodan za ultrazvučne kupke

Ne stvara penu

Izuzetno pogodan za poluautomatsko čišćenje endoskopa

Potpuno razgradivi granulat

Primena na svim područjima, kao i na endoskopima malog promera

Nema nekompatibilnosti s drugim aktivnim supstancama

Pogodan za predpranje/dezinfekciju pre mehaničkog čišćenja kad se koriste aldehidi

Ispitne trake za kontrolu efikasnosti

Mogućnost provere kvaliteta radnog rastvora, posebno kod rastvora koji su jako zaprljani organskim materijama

Područja primene

Sekusept® aktiv je pogodan za ručno čišćenje i dezinfekciju termo stabilnih i termo osetljivih medicinskih instrumenata, uklj. fleksibilne endoskope

Izrazito pogodan za kombinovano ručno-mašinsko (poluautomatsko) čišćenje endoskopa

Za ručno predpranje endoskopa pre mašinskog čišćenja

Ultrazvučne kupke

Sastav

Antimikrobne aktivne supstance, nejonski deterdženti, kompleksator, inhibitori korozije, mirisi.

Aktivan sastojak persirćetna kiselina stvara se tokom pripremanja rastvora za upotrebu. 2%-tni rastvor sadrži >1000mg / l persirćetne kiseline.

CE 0297

Vaša korist

Preporuka za primenu

Za čišćenje endoskopa i instrumenata

Ručno čišćenje

Uronite прибор u Sekusept aktiv odmah nakon upotrebe. Proverite da li su svi instrumenti potpuno uronjeni, ne sme biti nikakvih praznina ili mehurča. Izvadite прибор iz rastvora propisane koncentracije nakon propisanog vremena delovanja. Ispirite pitkom vodom ili idealno sterilnom, destilovanom ili demineraliziranom vodom.

Ultrazvučno čišćenje

Sekusept aktiv je pogodan za sve ultrazvučne kupke u posudama od nerđajućeg čelika. Kod ultrazvučnog čišćenja nužno je pridržavati se uputstva proizvođača.

Za efikasnu dezinfekciju prema Nemačkom društvu za higijenu i mikrobiologiju (DGHM) potrebno je pridržavati se navednog vremena uronjavanja (npr. 15 min).

Sekusept® aktiv je naročito pogodan za predpranje/dezinfekciju fleksibilnih endoskopa pre hemotermaalne dezinfekcije.

Ne postoji nekompatibilnost materijala između Sekusept® aktiva i mašina.

Doziranje i primena

Upotrebite priloženu dozirnu posudu za pripremanje rastvora (30 ml= 20g)

2%-tni rastvor sa 20 g/l

1%-tni rastvor sa 20 g/ 2l

Rastvorite potrebnu količinu praška. Nakon 15 min mešanja, rastvor je spreman za upotrebu. Položite instrumente i anesteziološku opremu u rastvor. Proverite da li su svi instrumenti potpuno uronjeni. Nakon isteka propisanog vremena potapanja, izvadite instrumente iz rastvora i ispirite pitkom vodom ili po mogućnosti destilovanom ili potpuno demineralizovanom vodom. Rastvor je potrebno menjati svakodnevno. Za proveru efikasnosti, npr. u slučaju jako prljavog rastvora, upotrebite ispitne trake.

Samo za profesionalnu upotrebu.

Veličine pakovanja

Sekusept® aktiv 40228532
1,5 kg plastična kanta 4 x 1,5kg

Peroxybalance - delotvorna stvar "Oxy" snage

PerOxyBalance postavlja nove standarde u pogledu nivoa dezinfekcije, snage čišćenja i podnošljivosti materijala. Primena u dezinfekciji površina i instrumenata. Ovaj bezaldehidni koncept obezbeđuje najsnažniji rastvor uravnoteženog pH.



Nudimo kompletne usluge i sastave koji u potpunosti zadovoljavaju sve vaše potrebe na području higijene i dezinfekcije institucionalnih, industrijskih i bolničkih objekata. Zatražite detaljnije informacije o našim proizvodima i uslugama u Evropi i svetu. Ecolab-Vaš partner za putpuna rešenja za higijenu!

Ecolab Healthcare
Čisto. Sigurno. Zdravo.

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com
Š 2008 Ecolab Inc. All rights reserved.

Ecolab Hygiene d.o.o.
Milana Tankosića 8, 11000 Beograd, Srbija
www.ecolabhealthcare.rs
tel: +381 11 2076 800 fax: +381 11 2076 802

PerOxyBalance®
ECOLAB®

Mikrobiološki i virološki rezultati		
	Konc. (%)	vreme za postizanje efekta
Dezinfekcija pribora prema DGHM, takođe i ultrazvučna kupka	1,0 2,0	60 min 15 min
Deluje na: -HBV, HIV, u DNA polimerazi DVV-viruse:	1,0 2,0	15 min 5 min
-adeno, papova, vaccinia, polio	1,0 2,0	60 min 10 min
Spore: -bacillus subtilis	2,0	30 min